

# Veloderm® 韦乐迪® 结晶纤维素敷料

## 产品性能

本品是通过采用先进和获得专利的生物工艺技术从纤维素微纤维中所制成的一种生物聚合物敷料。这种特殊纤维素类型，称为结晶纤维素，具有低聚合度和高结晶度。本品最长累积使用不得超过30天。

## 主要结构组成

本品由结晶纤维素制成。结晶纤维素是细菌纤维素，由于结晶度较高，故也称为结晶纤维素。分子式为 $(C_6H_{10}O_5)_n$ ，是一种由的 $\beta$ -1-4糖苷键连接的D-葡萄糖所组成的线性多糖。

## 适用范围

本品用于急性创面的创伤以及自体植皮供皮区，起创面保护、吸收渗出液作用。

## 使用说明

1. 消毒并清洁伤口。
2. 从包装中取出敷料。
3. 将用生理溶液润湿的本品敷料粘在伤口处。
4. 用地球轻轻地按压敷料，使敷料粘附伤口，并消除气泡。
5. 用纱布包裹伤口，不得使用胶布和胶带固定。

若需要，使用无菌器械将敷料切割成伤口所需的形状和大小。在伤口较大的情况下，可使用2片或以上的敷料(相互紧靠，边缘处有少许重叠部分)覆盖。

- 必须待伤口完全愈合，才可移除本品。
- 仅在感染、渗血或渗出物的情况下进行敷料替换。

## 禁忌症

1. 本品不得用于感染性伤口和烧伤伤口。
2. 建议对其成分过敏或不耐受的患者禁用。

## 注意事项、警示以及提示性内容

1. 本品为一次性使用产品，不得重复使用。
2. 本品为 $\gamma$ 辐射灭菌。仅在包装密封且完整的情况下，保证无菌。若包装损坏或已打开，不得使用。
3. 本品最长累积使用不得超过30天。

## 产品维护和保养

- 请在包装上注明的使用期限内使用。
- 若包装损坏或已打开，不得使用。
- 包装打开后应立即使用。

## 储存

密封，在阴凉干燥处保存。贮藏温度为-5℃到40℃。

## 使用期限

有效期为60个月。

## 符号

REF	LOT	cm	LATEX FREE	
		②	STERILE R	

## 型号、规格

PKV0069	6×9cm	每盒中含有1片密封包装
PKV0912	9×12cm	每盒中含有1片密封包装
PKV1218	12×18cm	每盒中含有1片密封包装

医疗器械注册证编号：国械注进20162642062

注册产品标准编号：YZB/ITA 0478-2016

## 注册人和生产企业：

企业名称：BTC S.r.l.

注册地址：Via E. Toti, 28-60123 Ancona, Italy

生产地址：Via Floretti, 4-60131 Ancona, Italy

电话：+39 071 2916249

传真：+39 071 2869329

网址：www.veloderm.com

## 代理人：

代理人名称：商丘赛诺雅药业有限公司

代理人地址：夏邑县产业集聚区跨越大道东段路北

电话：0370-6685168

传真：0370-6685168

## 售后服务单位：

Sinoyoung

赛诺雅药业

企业名称：商丘赛诺雅药业有限公司

注册地址：夏邑县产业集聚区跨越大道东段路北

电话：0370-6685168

传真：0370-6685168

网址：www.jssinoyoung.com.cn